



8.7. Дезинфекцию средством «Водорода перекись медицинская» проводят при инфекциях бактериальной (включая туберкулез и особо опасные инфекции: сибирская язва, чума, сап, мелиоидоз, холера, туляремия), вирусной и грибковой этиологии, а также для борьбы с плесенью.

Дезинфекцию с применением средства «Биопаг-Д» проводят при бактериальных, вирусных и грибковых инфекциях и для борьбы с плесенью.

Дезинфекцию средством «Дезэфект-Форвард» проводят при инфекциях бактериальной (включая особо опасные – чума, холера), вирусной и грибковой этиологии (табл. 1).

Табл.1. Режимы дезинфекции воздуха и поверхностей растворами дезинфицирующих средств

Бактерии	Микобактерии туберкулеза	Вирусы	Грибы	Споры микроорганизмов	Плесень
<b>Водорода медицинская перекись</b>					
3,0% - 60 мин	5,0% - 60 мин	4,0% - 60 мин	4,0% - 60 мин	6,0% - 120 мин	6,0% - 120 мин
<b>«Биопаг Д»</b>					
0,5% - 60 мин	-	2,0% - 60 мин	1,0% - 120 мин	-	5,0% - 60 мин
<b>«Дезэфект-Форвард»</b>					
0,5% - 60 мин	-	0,5% - 60 мин	3,0% - 60 мин	-	-

При выборе других дезинфицирующих средств с использованием установки «ГАРД» их применяют в режимах, указанных для аэрозольной обработки в Инструкциях/Методических указаниях по применению конкретных дезинфицирующих средств.